



KOH-甘油-墨汁染色液

产品说明:

氢氧化钾因其有独特的折射率可以澄清试剂、溶解角蛋白,有助于观察真菌结构,特别是皮肤癣菌的菌丝和节孢子。

产品组成:

货号	产品	规格	储存条件
S-1560	KOH-甘油-墨汁染色液	15ml	室温
--	说明书	1份	

有效期: 12 个月。原包装未开封染色液的使用期限为 12 个月,在有效期内的已开封染色液建议在开封后 6 个月内使用完,每次用后应及时拧紧瓶盖,以免挥发或变质。

实验步骤:

在显微载玻片上加一滴染液,取少许标本与之混合,盖上盖玻片后,在本生灯或酒精灯的低焰下缓慢加热。在进行此操作时,必须小心并反复地把盖玻片往下轻压,直到标本均一地溶解(分离),否则对于头癣和甲真菌病等稍致密的标本,难以进行准确观察。

数小时后在低倍镜下观察,然后转换高倍镜确认。

结果判定: 菌体染成蓝黑色。